

**öffnen**



**einschalten**

**Anfang**  
Bewusstsein prüfen

Notruf veranlassen  
144

Kopf leicht überstrecken...



**Auf den nackten  
Brustkorb kleben  
- Kleiderschere -**



Atmung prüfen  
Falls keine Atmung  
- 2 Atemstöße

Defi-Pads  
montieren..

Nicht berühren  
Herzrhythmus wird  
analysiert...

Bei blinkender  
Schock-taste,  
drücken und  
weiterfahren...

30 x Herzdruckmassage  
2 x Atemstöße

für 2 Minuten, dann  
beginnt das Gerät von  
vorne

